

CONTROLE DE VELOCIDADE UNIVERSAL

Sharper PREMIUM



- Entrada P4 12V.
- Saída P2 até 12V. - 1A.
- Potência 10W.
- Exclusivo para alimentar aparelhos com motores elétricos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Sharper PREMIUM é um controlador de velocidade para aparelhos com motores elétricos até 12V.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

1 - Conecte a fonte de alimentação na entrada 12V. do controle de velocidade.

2 - Conecte a extremidade P2 do cabo na saída P2 do controle de velocidade e a outra no dermógrafo.

3 - Selecione o tipo de procedimento desejado (Paramédica ou Estética).

4 - Na opção "Paramédica" escolha entre as opções de micropigmentação capilar, aréolas, estrias, ou volte ao menu inicial.

5 - Na opção "Estética" escolha entre as opções de micropigmentação de sobrancelhas, lábios, olhos, ou volte ao menu inicial.

6 - Aumente ou diminua a velocidade, volte ao menu anterior, ligue ou pause o dermógrafo. Os níveis de velocidade são gravados na memória mesmo com o controle desligado.



Fonte 12V.

Conectando fonte no controle.



P2

Conectando cabo no controle.



P2

Conectando cabo no dermógrafo.




Painel inicial.




PÁGINA INICIAL

Painel de procedimentos paramédicos.

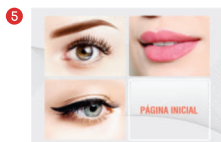

PÁGINA INICIAL

Painel de procedimentos estéticos.

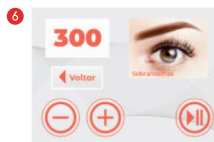

300

Voltar

+

-

▶▶

Configuração de velocidade.

